

Fenix Carboxytherapy

Karboaksyterapia

Fenix




Medical Device CE, FDA



Czym jest karboksyterapia?

- Jedyna terapia działająca ogólnorozwojowo, umożliwiającą efekt synergiczny.
- Karboksyterapia to obecnie najskuteczniejsza metoda redukująca cellulit i rozstępy. Usprawnia krążenie, niszczy złogi tłuszczowe, opóźnia procesy starzenia. W ciągu 7 dni po zabiegu karboksyterapii istnieje wzmożona cyrkulacja tlenu w miejscach aplikacji. Mikrokrążenie zostaje przywrócone i pobudzone, a drenaż limfatyczny zwiększony.
- Karboksyterapia jest zgodna z procesami fizjologicznymi zachodzącymi codziennie w naszym organizmie. Po aplikacji gaz wędruje do płuc i zostaje wydalony z organizmu w sposób naturalny, jako produkt wymiany gazowej. W trakcie zabiegu ilość podanego dwutlenku węgla jest zbliżona do ilości gazu wytwarzanego w organizmie podczas wysiłku fizycznego.
- CO₂ po podskórnym podaniu rozbija mechanicznie złogi tłuszczowe i silnie rozszerza naczynia krwionośne zwiększając przepływ krwi do obszaru, który stymuluje metabolizm tłuszczu. Następuje stymulacja produkcji kolagenu i elastyny, które odpowiadają za jędrność skóry oraz zwiększa drenaż limfatyczny. Mikrokrążenie zostaje przywrócone i pobudzone, co oznacza więcej tlenu i substancji odżywczych dla skóry.

Oddziaływanie dwutlenku węgla w tkance

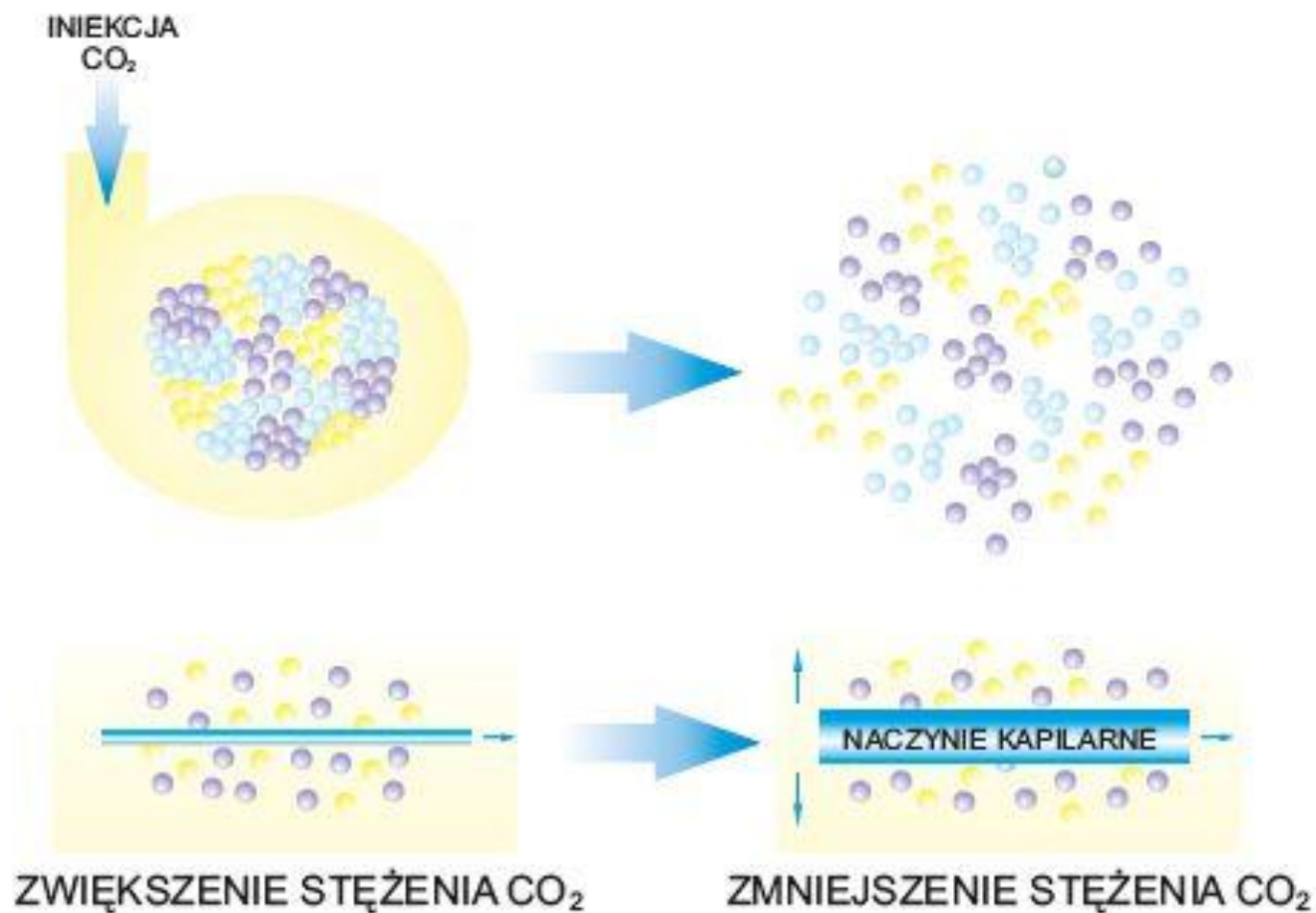

Jedno rozwiązanie trzy funkcje

Trzy tryby pracy

- Karboksyterapia (tryb automatyczny)
- Karboksyterapia (tryb ciągły)
- Mezoterapia i mezoterapia osoczem (PRP)



Programy zabiegowe

- Karboksyterapia okolic wrażliwych
tj. oczy, skóra głowy,
- Karboksyterapia – tkanka tłuszczowa,
- Innowacja – Three Way Injection,
- Karboksyterapia – implantacja nici PDO

Tryby pracy

Tryby pracy			
	Ekran	Ilość cykli	Regulacja wielkości przepływu
Manualny	C	Manual	10~100cc/min
Automatyczny	A-1	66 Cykli/min	0.07~0.75/1 strzał
	A-2	156 Cykli/min	0.03~0.32/1 strzał
	A-3	192 Cykli/min	0.02~0.26/1 strzał
	A-4	288 Cykli/min	0.015~0.17/1 strzał
	A-5	420 cykli/min	0.01~0.11/1 strzał

Fenix karboksyterapia bez ograniczeń


- Łatwa i szybka iniekcja dzięki zastosowaniu pneumatycznego pistoletu.
- Bezpieczeństwo i kontrola – zawsze ściśle określona dawka.
- Bezbolesne zabiegi dzięki podgrzewaniu gazu
- Synergiczne oddziaływanie karboksyterapii i mezoterapii w jednym zabiegu.

Fenix Carboxytherapy


- Nowoczesne urządzenie w innowatorski sposób łączące wszystkie zalety karboksyterapii
- Podgrzewanie gazu
- Pneumatyczny pistolet umożliwiający szybkie i precyzyjne podawanie CO₂
- Tryb manualny




Redukcja cellulitu I-go stopnia

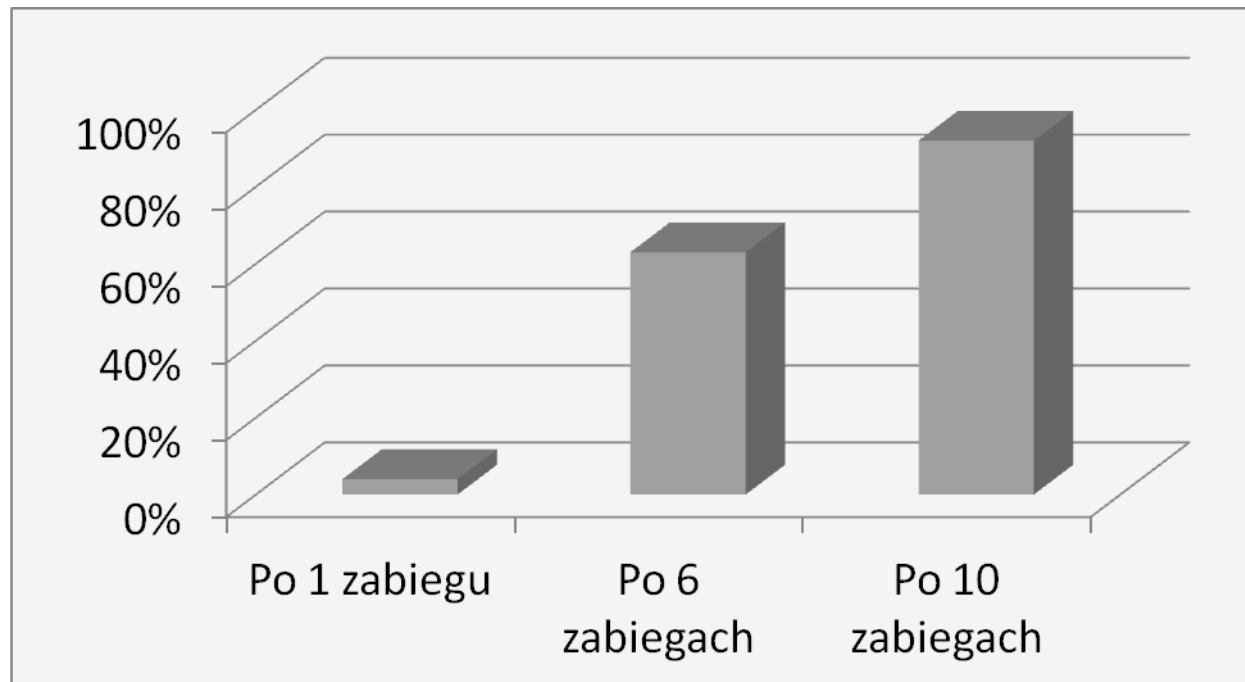


Redukcja cellulitu III-go stopnia

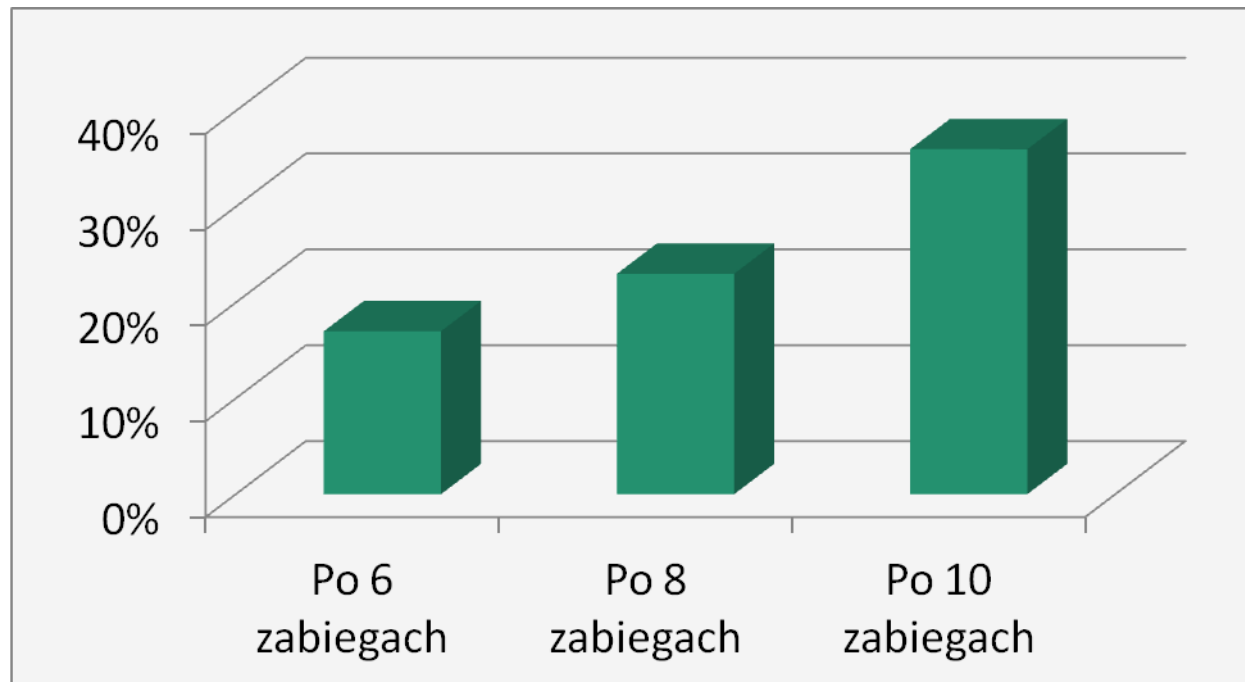

Redukcja tkanki tłuszczowej

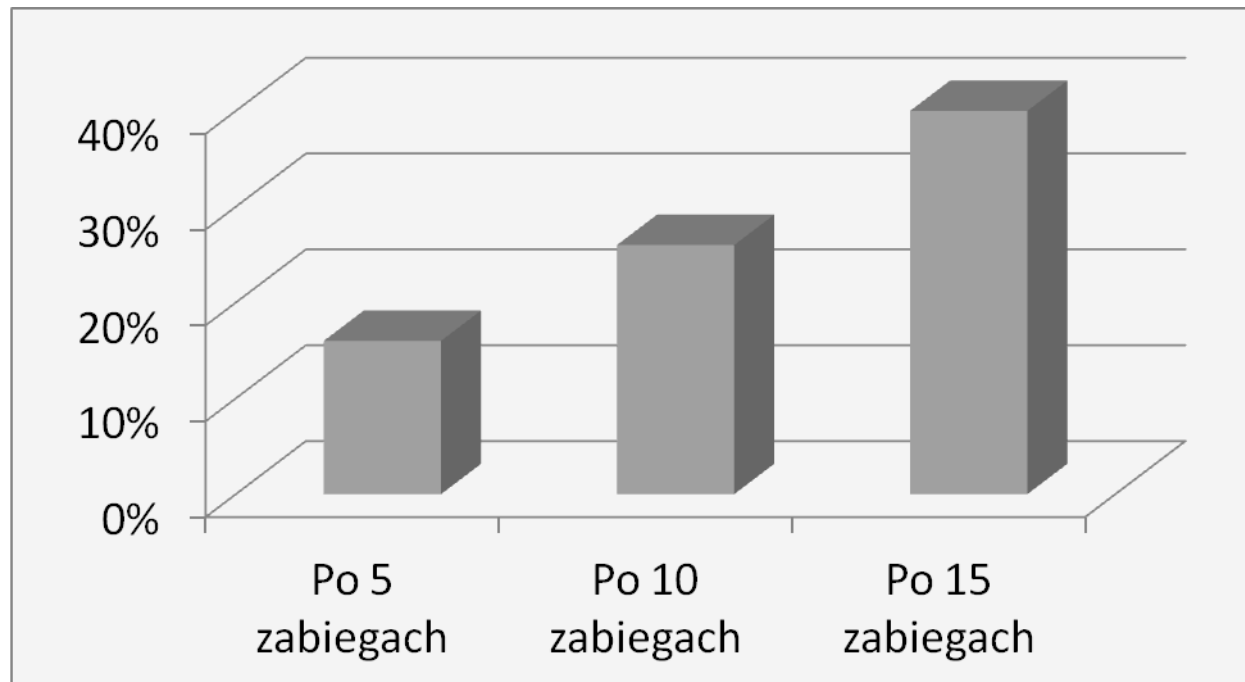

Redukcja wypadania włosów

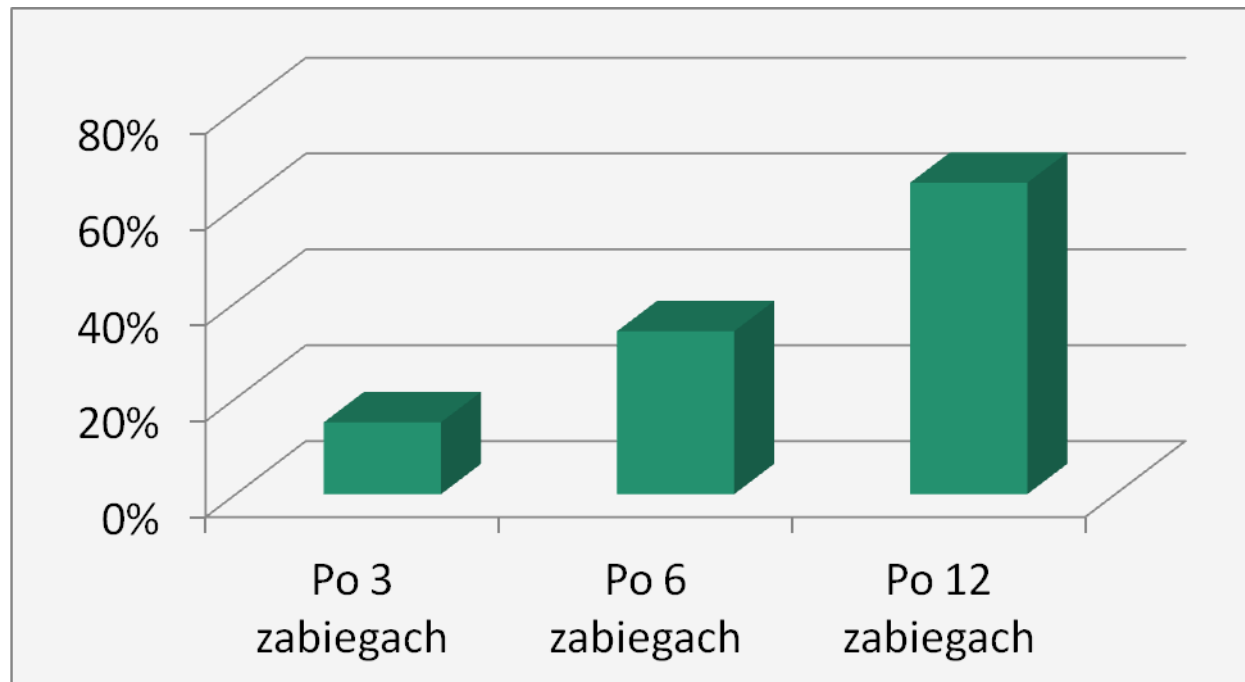

Efekty terapii Fenix

- Wzrost dopływu tlenu do leczonego obszaru 40%
- Zwiększenie syntezy kolagenu i elastyny 36%
- Redukcja rozstępów do 70 %
- Redukcja tkanki tłuszczowej do 29%
- Zmniejszenie wypadania włosów 43%

Wskazania do zabiegu w medycynie estetycznej

- Zlokalizowana tkanka tłuszczowa,
- Cellulit,
- Blizny i rozstępy,
- Zwiotczenie piersi,
- Opadające powieki,
- Ciemne kręgi pod oczami,
- Zmarszczki skóry twarzy, dekoltu i szyi,
- Brak elastyczności skóry ramion, nóg, brzucha,
- Zwiotczenia skóry po ciąży i utracie wagi ciała,

Wskazania do zabiegu w celach leczniczych

- Niewydolność żylna,
- Owrzodzenie cukrzycowe,
- Owrzodzenie żylakowe,
- Zaburzenia krążenia,
- Syndrom Raynaud'a,
- Kurcze kończyn,
- Łuszczyca,
- Odleżyny

Fenix Carboxytherapy


Wskazanie: Rozstępy



Przed i po 3 zabiegach

Fenix Carboxytherapy


Wskazanie: łysienie

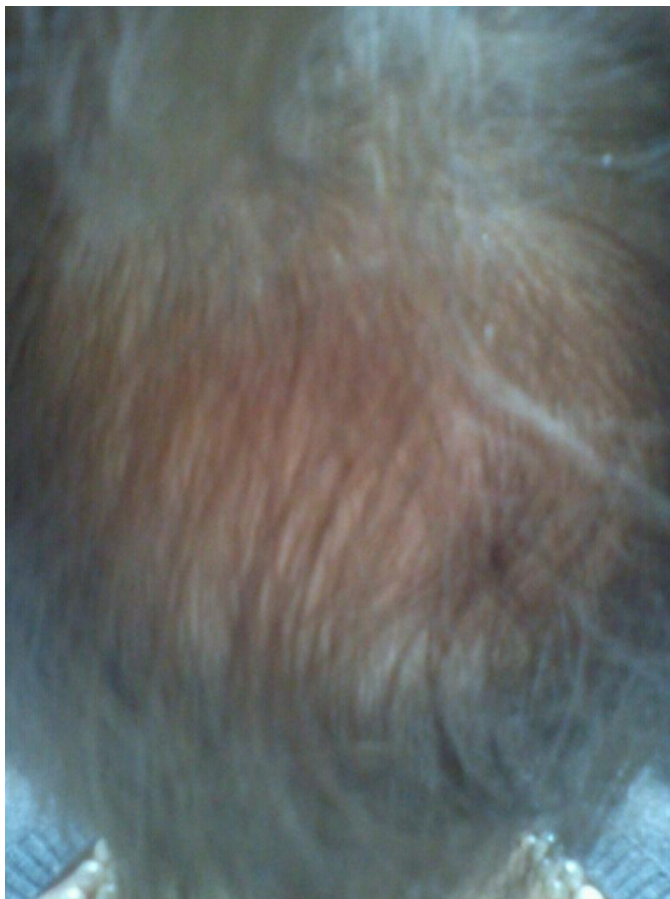

Przed i po 15 zabiegach

Fenix Carboxytherapy

Wskazanie: teleangiektazje

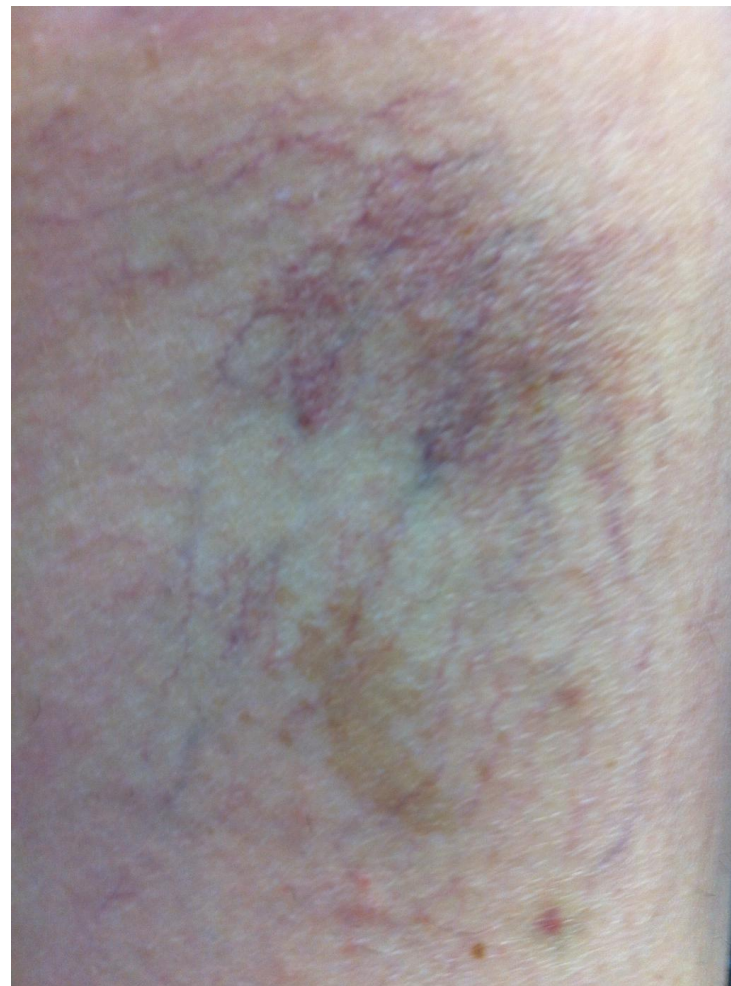

Przed i po 2 zabiegach

Fenix Carboxytherapy

Wskazanie: Łuszczyca



Przed i po 5 zabiegach

Wskazanie: cienie pod oczami



Przed i po 3 zabiegach

Dane techniczne urządzenia:

1. Konsola (CE 0120)

Wymiary: 20,5 x 30 x 25

Waga: 10,5 kg

Wymagania elektryczne: 220 V/ 88W 60 Hz

2. Pistolet:

Wymiary: 33,5 x 20 x 25

Waga: 558 g

Fenix Carboxytherapy

Wyłączny dystrybutor:



Urządzenia i akcesoria do gabinetów medycyny estetycznej,
dermatologii i chirurgii plastycznej.

mobile: +48 504 772 242 • +48 512 944 333 • tel: +48 91 817 23 78

ul. Małkowskiego 30/6 • 70-304 Szczecin • biuro@esteticline.pl